

# ESTERILIZACIÓN E HIGIENE DE UNA CLÍNICA DENTAL

## 1 LIMPIEZA GENERAL

¿Qué?

Los espacios de la clínica

¿Cuándo?

Después de cada jornada de trabajo

¿Con qué productos?

- ▶ Dento Viractis 75,
- ▶ Dento Viractis 77



## 2 PRE-LAVADO INSTRUMENTAL

Permite eliminar de forma mecánica restos orgánicos visibles, sangre y saliva de las superficies del instrumento, para facilitar la posterior desinfección y esterilización.

1



Limpieza con agua tibia y detergente o agentes enzimáticos

2



Uso de un cepillo de manos para eliminar los residuos visibles

3



Aclarar con agua y preparado para la desinfección

4



Utilizar guantes de limpieza

5



Uso de máscara, gafas de protección y vestimenta adecuada

## 3 DESINFECCIÓN INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, SUPERFICIES DE TRABAJO Y ASPIRACIÓN

### DESINFECCIÓN MANUAL

Después del prelavado con agentes enzimáticos o tensioactivos:

1. El instrumental debe estar completamente inmerso en un recipiente específico de limpieza con desinfectante de alto nivel. **Al menos 20 min.**
2. Pasado el tiempo marcado, volver a frotar con cepillo limpio.
3. Aclarar y secar.
4. Lubricar en caso necesario y ensobrar para esterilizar.



#### Productos



Id 212



Dento Viractis 53



Cubeta de desinfección Dento Viractis

### DESINFECCIÓN MECÁNICA

El acondicionamiento y transporte se realiza justo después de cada tratamiento.

- El líquido de limpieza se debe cambiar un mínimo de dos veces al día (o cuando aparece muy contaminado).
- La tapa debe estar cerrada durante la operación (para evitar la dispersión de los aerosoles).
- El instrumental debe estar completamente sumergido en el líquido, y ninguna parte de los dedos del operador, o de las manos, debe ser sumergida en el líquido durante el funcionamiento.

Al final de cada día, el tanque de limpiador ultrasónico debe ser vaciado, limpiado y dejado secar.

#### Productos



Hygibox



Instrugerm 51



Easysonic+



Cuba de ultrasonidos



Multisteril

## 4 ESTERILIZACIÓN

¿Qué?

- ▶ Material odontológico

¿Cuándo?

- ▶ Cada día

#### Productos



Termoselladora TS-12



Hygopac



Fundas medibase



Autoclave Lina



Test BowieDick

## 5 CONTROL SEMANAL DEL AUTOCLAVE

¿Cuándo?

▶ Cada semana

#### Productos



B-test Plus



Indicadores biológicos Hygitech